
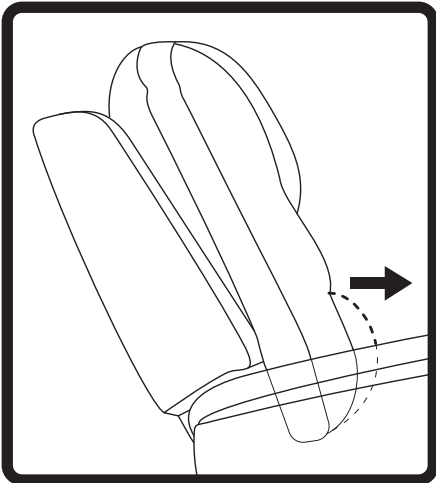
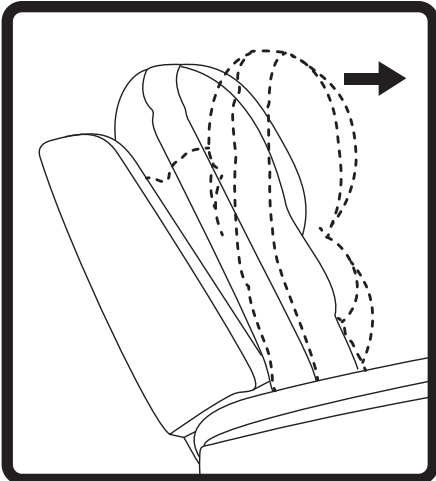


# VivaLIFT!®

## POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.

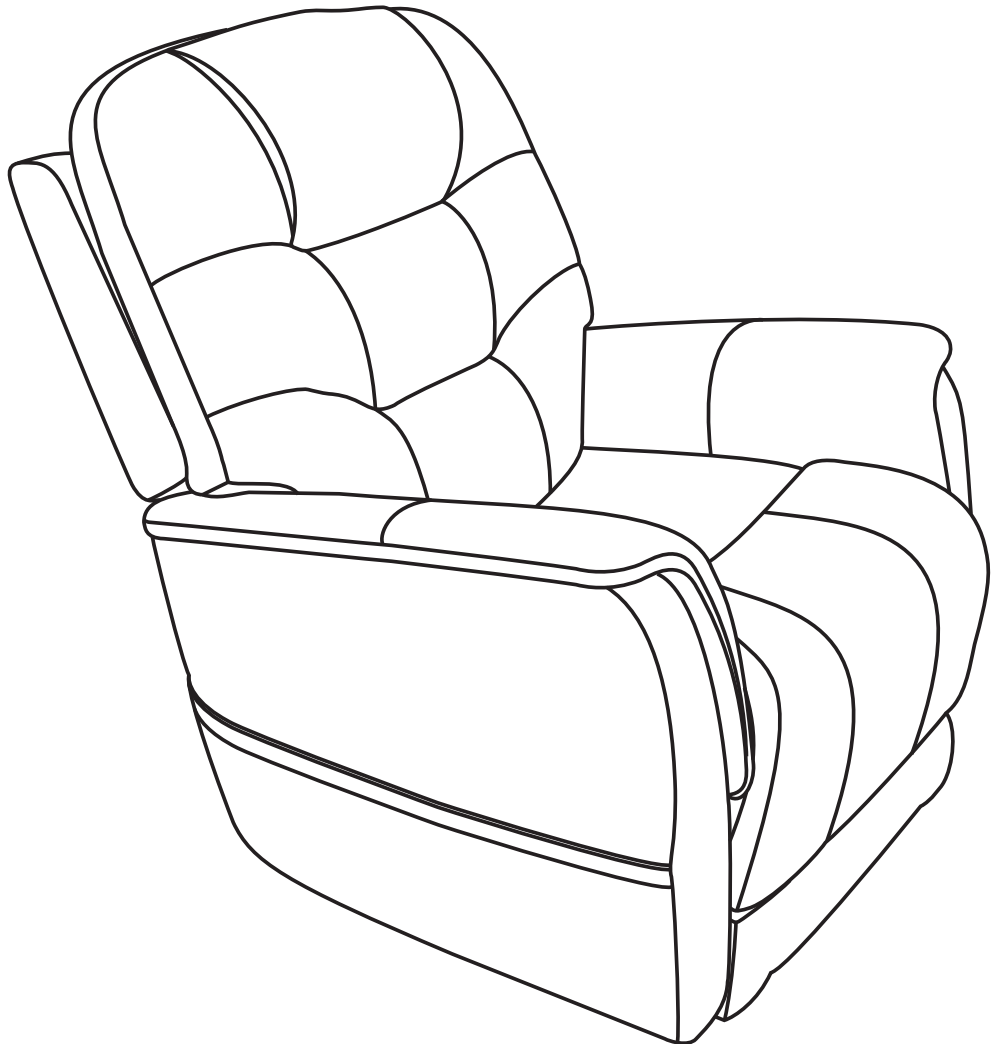

**NOTE:** Ce guide de référence rapide offre des informations d'assemblage de base, des fonctions de la manette de commande, des informations sur la garantie, la capacité de poids et des instructions de soins généraux pour votre fauteuil. Avant d'utiliser le fauteuil, lire attentivement le manuel du propriétaire et tous les autres documents supplémentaires pour obtenir des informations sur la sécurité, l'exploitation de base et sur les soins et l'entretien.

Les illustrations indiquent les commandes manuelles avec le plus haut niveau de fonctionnalité. La manette de commande que vous recevez peut disposer de moins d'options, mais la fonctionnalité de base est la même.

La caractéristique principale du « fauteuil inclinable motorisé VivaLIFT! » est que vous avez la possibilité d'ajuster la position de vos pieds et de votre dos indépendamment afin d'atteindre votre position parfaite. Par exemple, le dossier peut s'incliner jusqu'à ce qu'il soit complètement horizontal. Pour ce faire, maintenez la touche « 8 » enfoncée (comme indiqué sur la **figure 1**) jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement incliné.

### CLE D'IDENTIFICATION DE LA MANETTE DE COMMANDE

#### 1. PORT USB

Utilisez pour connecter / charger des périphériques USB.

#### 2. TOUCHE AUGMENTER APPUI-TETE

Maintenez la touche enfoncée pour augmenter l'appui-tête.

#### 3. TOUCHE REDUIRE APPUI-TETE

Maintenez la touche enfoncée pour réduire l'appui-tête.

#### 4. TOUCHE AUGMENTER SUPPORT LOMBAIRE

Maintenez la touche enfoncée pour augmenter le support lombaire.

#### 5. TOUCHE REDUIRE SUPPORT LOMBAIRE

Maintenez la touche enfoncée pour réduire le support lombaire.

#### 6. TOUCHE HAUT

Maintenez la touche enfoncée pour ramener toutes les options du fauteuil à la position neutre, tout en vous soulevant dans une position verticale.

**MISE EN GARDE! N'essayez pas de vous tenir debout tant que vous ne serez pas en mesure de vous tenir debout, que vos pieds sont solides et que vous pouvez supporter le poids. Pride recommande l'utilisation d'aides à l'assistance et / ou d'un assistant pour une meilleure stabilité.**

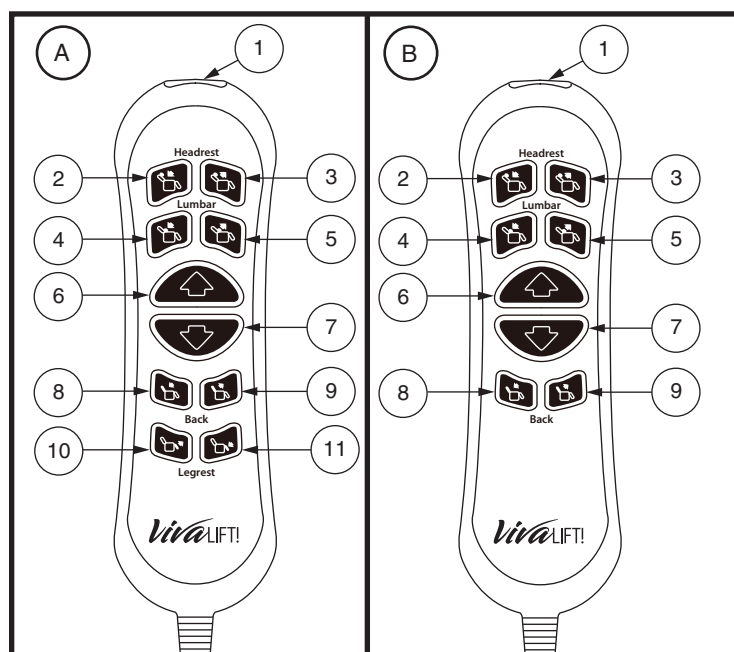


Figure 1. Manette de commande - Styles A et B

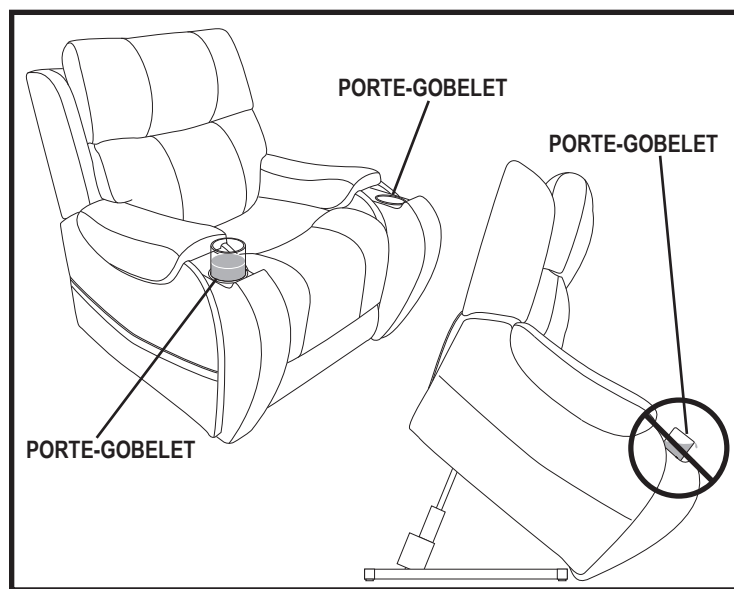


Figure 2. Porte-gobelet



**MISE EN GARDE! Évitez de mettre tout votre poids sur les accoudoirs de la chaise lorsque vous tentez de vous tenir debout et n'utilisez pas les accoudoirs pour supporter le poids.**

Si votre fauteuil est équipé de porte-gobelets, assurez-vous que les porte-gobelets sont vides avant d'élever votre fauteuil au-dessus d'une position assise en position debout. **Voir la figure 2.**



**MISE EN GARDE! Tout contenu dans le porte-gobelet peut se décaler ou se renverser lorsque le fauteuil est soulevé. Retirez tout le contenu avant d'élever votre chaise. Si vous ne retirez pas tout le contenu des porte-gobelets avant d'élever votre chaise au-dessus d'une position assise, vous risquez de vous blesser ou de causer des dommages matériels.**

**MISE EN GARDE! Ne placez JAMAIS de produits de tabac allumés dans les porte-gobelets, n'essayez pas d'utiliser les porte-gobelets ou n'essayez pas d'utiliser les porte-gobelets comme un cendrier.**

## **6. TOUCHE HAUT**

Maintenez la touche enfoncée pour ramener toutes les options du fauteuil à la position neutre, tout en vous soulevant dans une position verticale.

## **7. TOUCHE BAS**

Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le fauteuil en position assise ou inclinée.

## **8. TOUCHE INCLINER LE DOSSIER**

Maintenez la touche enfoncée pour incliner le dossier du fauteuil.

## **9. TOUCHE RELEVER LE DOSSIER**

Maintenez la touche enfoncée pour relever le dossier du fauteuil.

## **10. TOUCHE RELEVER LE REPOSE-PIED**

Maintenez la touche enfoncée pour relever le repose-pied.

## **11. TOUCHE ABAISSER LE REPOSE-PIED**

Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le repose-pied.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU TISSU

Le tissu qui recouvre ce meuble est très durable pour la vie quotidienne. Nettoyer uniquement avec un shampoing à base d'eau ou une mousse nettoyante pour tapisserie de meubles. Ne pas trop mouiller. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les taches. Frotter légèrement pour éliminer les taches les plus difficiles du fauteuil. Travaillez d'abord sur une petite tache du tissu dans une zone qui n'est pas visible pour assurer que l'agent de nettoyage utilisé ne décolorera pas ou n'abîmera pas le tissu du fauteuil. Pour obtenir des meilleurs résultats, laissez le fauteuil sécher à l'air puis aspirez.

### MONTAGE DU FAUTEUIL

Une fois que le fauteuil a été retiré de sa boîte d'emballage, vous remarquerez que le dossier est couché sur le dessus du siège. Suivez les étapes ci-dessous:

1. Certains modèles ont des ailes de dossier qui s'attachent au dossier. Lorsque vous déballez votre fauteuil, vous trouverez ces ailes de dossier emballées à l'arrière de la base du fauteuil. Veuillez déballer les ailes de dossier et les mettre de côté pour une installation ultérieure.
2. Localisez le sac en plastique qui contient le transformateur d'alimentation, le cordon d'alimentation et la manette de commande. Vous le trouverez en tournant la base sur ses accoudoirs. Vous verrez le sac en plastique attaché à l'intérieur de la base. Coupez soigneusement les attaches qui maintiennent le sac et retirez-le. Éliminer les attaches et le sac dans le respect de l'environnement.
3. Retirez la manette de commande du sac en plastique et connectez-la à la fiche femelle située à l'arrière du fauteuil. **Voir la figure 3.**

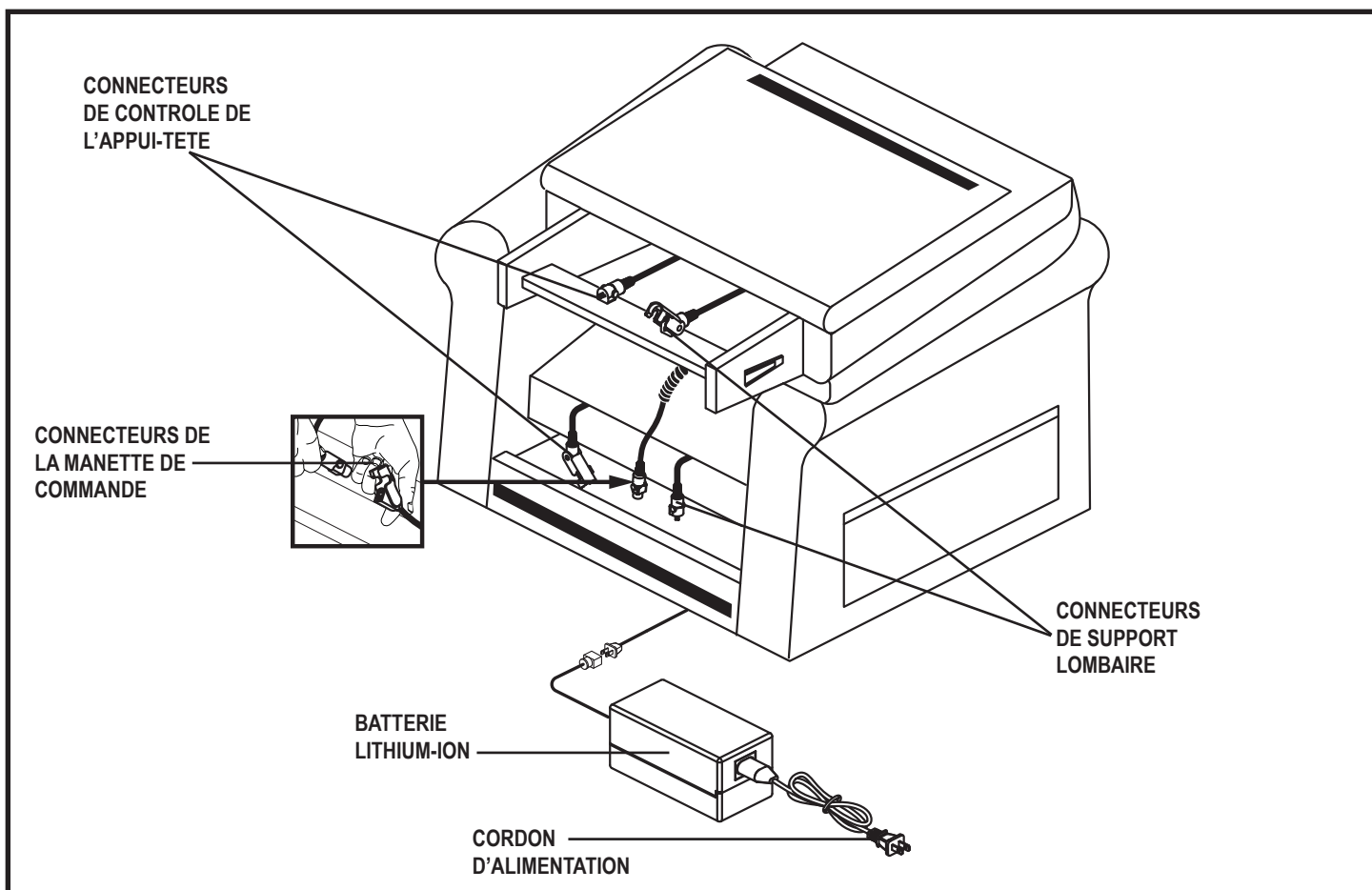


Figure 2. Ensemble du fauteuil - transformateur d'alimentation, cordons et connexions

4. Pour installer le dossier, alignez les manchons d'assemblage à l'arrière avec les supports d'assemblage dans la base du fauteuil, faites glisser le dossier sur la base. **Voir la figure 4.** Appuyez sur le haut du dossier pour le verrouiller en place. Vous entendrez un clic de chaque côté du fauteuil vous assurant que le dossier est verrouillé correctement.
5. Branchez les connecteurs du support lombaire et de l'appui-tête, **voir la figure 3.** Si votre modèle est équipé uniquement d'un appui-tête, il vous suffit de brancher l'appui-tête.
6. Si votre modèle est équipé d'ailes de dossier, alignez les manchons d'assemblage et faites glisser les ailes en place, **voir la figure 5.** Veuillez noter qu'il y a une étiquette d'assemblage sur les supports. Veuillez les assembler en faisant correspondre A-A et B-B.
7. Connectez le câble du transformateur d'alimentation au connecteur correspondant provenant de l'arrière du fauteuil. **Voir la figure 3.**
8. Connectez le cordon d'alimentation au transformateur d'alimentation. **Voir la figure 3.**
9. Connectez le cordon d'alimentation à une prise secteur près de l'endroit où le fauteuil sera utilisé.

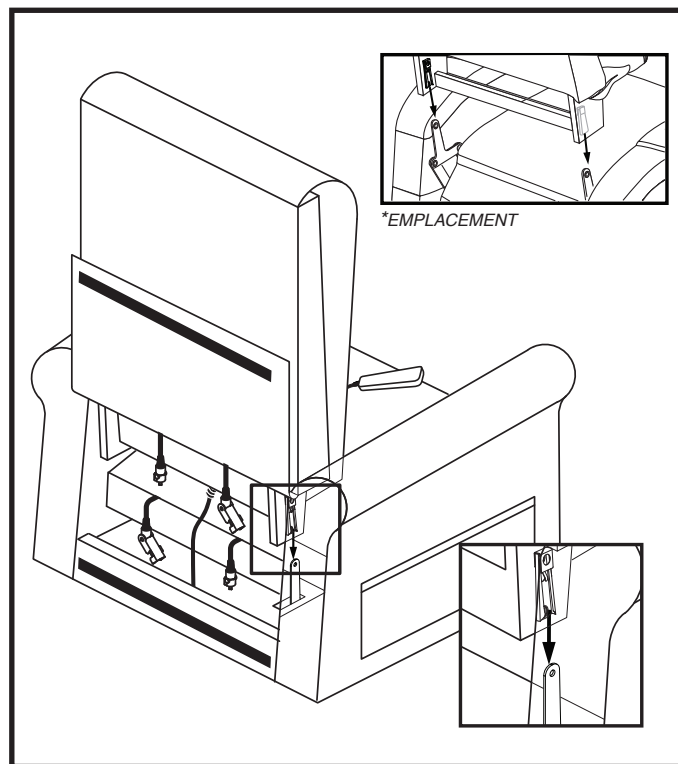


Figure 4. Installation du dossier du fauteuil

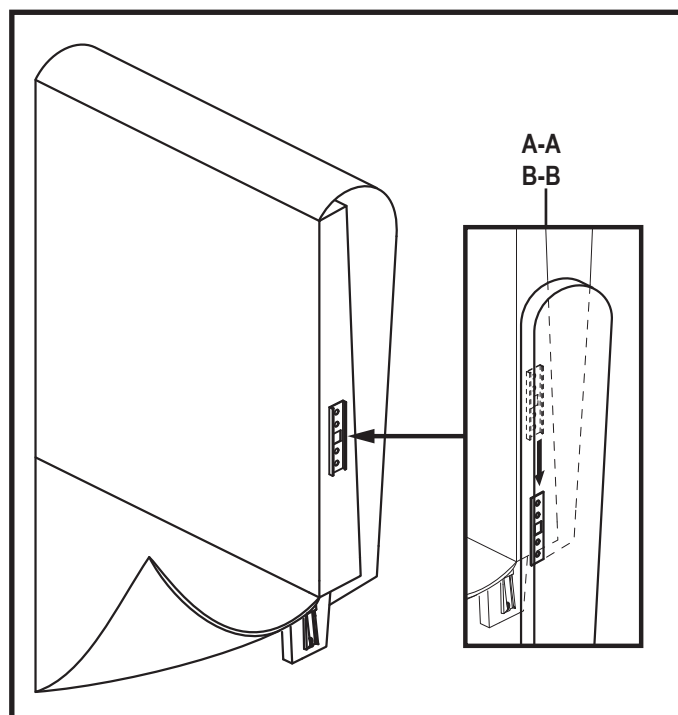


Figure 5. Installation de l'aile du dossier

### GARANTIE À VIE

Pride offre une garantie à vie sur les mécanismes de levage et d'inclinaison, et sur le châssis. Pride garantit que les mécanismes de levage et d'inclinaison et le châssis de votre fauteuil seront exempts de défauts dans des conditions normales d'utilisation tant que le fauteuil sera utilisé par le propriétaire original. Cette garantie à vie couvre les mécanismes de levage et d'inclinaison contre la fatigue des métaux, les soudures défectueuses et les bagues.

**NOTE: Pride se réserve le droit de remplacer uniquement la partie du mécanisme de levage et d'inclinaison ou du châssis du fauteuil qui pourrait être défectueuse.**

### GARANTIE AU PRORATA DE SEPT ANS

Pour une période de quatre (4) ans à compter de la date d'achat, Pride réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais et pour l'acheteur original, l'un des éléments suivants qui après avoir été examiné par un représentant autorisé de Pride s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau et/ou de fabrication:

- Moteur
- Appui-tête électrique
- Manette de commande
- Lombaire électrique
- Transformateur / boîte de commande

Pour trois (3) années supplémentaires, une garantie au prorata sera disponible pour les pièces suivantes:

- Moteur
- Appui-tête électrique
- Manette de commande
- Lombaire électrique
- Transformateur / boîte de commande

Pride garantira ces composants selon le calendrier prorata suivant:

- **Cinquième année** : 25% de rabais sur le prix de détail suggéré
- **Sixième année** : 15% de rabais sur le prix de détail suggéré
- **Septième année**: 5% de rabais sur le prix de détail suggéré

### BATTERIE LITHIUM-ION

La batterie Lithium-Ion est couverte par une garantie de douze (12) mois (1 an).

### EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne s'étend pas au tissu.

Pride ne sera pas tenue responsable ou obligée de payer les frais de main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et/ou tout autre frais engagé pour la réparation du produit. Tous les frais de transport et les dommages encourus lors de l'expédition des pièces pour réparation ou remplacement sont à la charge de l'acheteur. Veuillez contacter votre détaillant Pride autorisé pour obtenir des informations sur le coût actuel associé à une visite de service.

- Circonstances hors du contrôle Pride
- La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, A L'AVANCE, de Pride
- Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans le consentement spécifique de Pride

**Les exclusions comprennent également les dommages causés par :**

- Contamination
- Fuites ou renversements du liquide des batteries
- Utilisation commerciale ou utilisation autre que la normale
- Abus, mauvais usage, accident ou négligence
- Exploitation, entretien ou stockage incorrects

**REMARQUE: Votre fauteuil n'est pas conçu pour être utilisé comme lit. Une telle utilisation peut raccourcir la durée de vie du produit et annuler la garantie.**

### GARANTIES IMPLICITES

**Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat d'origine et dans la mesure permise par la loi.** Toutes autres garanties implicites sont exclues. Ceci est le seul recours. Les responsabilités pour dommages indirects pour toutes les garanties sont exclues.

Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Votre fauteuil a été conçu pour votre commodité. Votre chaise a une capacité de poids de 170 kg (375 lb). Reportez-vous au manuel du propriétaire pour toute information supplémentaire concernant votre fauteuil.



**OBLIGATOIRE!** Respectez la capacité de poids spécifiée pour votre fauteuil inclinable motorisé. Le dépassement de la capacité de poids spécifiée annulera la garantie de votre fauteuil inclinable motorisé.

Rev C/March 2019



I N F I N I T Y B 3 8 7 5